



MOTomed Protección de Movimiento

El MOTomed muvi dispone de dos funciones de seguridad que posibilitan una terapia de terapia regular y segura especialmente para pacientes con parálisis espástica: MOTomed Protección de Movimiento y Programa de Relajación de espasmos.

MOTomed Protección de Movimiento

En caso de un espasmo, una crispación muscular o un bloqueo de movimiento durante el ejercicio, la Protección de Movimiento detiene el movimiento de giro. La particularidad de esta función de seguridad: Si la tensión básica de la musculatura (tono) cambia, la Protección de Movimiento no sigue constante sino se adapta automáticamente a cada cambio del tono y es con eso lo más sensible posible. De esta manera la Protección de Movimiento siempre reacciona lo más sensible posible.

MOTomed Programa de Relajación de Espasticidad

El Programa de Relajación de Espasticidad con cambio de dirección automático alivia espasmos según el principio terapéutico: Espasticidad de flexión se alivia por extensión y espasticidad de extensión por flexión. El motor detiene suavemente el movimiento de giro. Se descargan las piernas o los brazos y después de una corta fase de relajación cambia suavemente el sentido de giro. Este proceso se repite hasta que el calambre esté aliviado.

?